

I BENEFICI PER GLI OSPEDALI ✓

Lo scopo del **Progetto Cicogna** è la realizzazione di un nuovo dispositivo medico per il monitoraggio remoto madre/neonato nel periodo finale della gravidanza o in gravidanze a rischio con mutui benefici per le madri e le strutture sanitarie.

01

Ottimizzazione dell'uso delle risorse e delle strutture sanitarie con conseguente contenimento dei costi.

02

Attivazione delle risorse sanitarie solo quando sono effettivamente necessarie (visite in ambulatorio o a domicilio, ricovero per parto o interventi preventivi) grazie ad un costante controllo remoto.

03

Tempestività di intervento in caso di problemi alla madre o al feto.

04

Raccolta di dati sui movimenti fetali e conseguente utilizzo di questi parametri per studi e ricerche volti alla riduzione degli eventi negativi nel periodo finale della gravidanza e in gravidanze a rischio.

05

Identificazione precoce, quando possibile, di rischio di aborto spontaneo e natimortalità con conseguente riduzione di questi episodi negativi.



PROGETTO CICOGNA

Vivi serenamente il momento
più bello della tua vita

PROGETTO CICOGNA
SOFTWARE TEAM

Via Carducci, 39, 20099
Sesto San Giovanni (Milano), Italy

www.cicogna.life
info@cicogna.life
+39 02 84148166



DISPOSITIVO CICOGNA
@dispositivocicogna



La tecnologia al servizio di una gravidanza serena

Un progetto basato su tecnologie indossabili e sulla trasmissione di dati relativi ai movimenti fetali per il monitoraggio remoto della madre e del feto nel periodo finale della gravidanza e nelle gravidanze a rischio.



I BENEFICI PER LE MAMME ✓

Progetto Cicogna accompagna la madre nel periodo finale della gravidanza, dandole la sicurezza di un controllo remoto costante dello stato di salute del feto.

01

Percezione da parte della gestante di un'elevata qualità di servizio sanitario ricevuto.

02

Aumentato senso di tranquillità da parte della madre che sa di essere costantemente monitorata.

03

Certezza di ricevere assistenza tempestiva in caso di necessità, soprattutto qualora la madre viva lontano dalla struttura sanitaria.

04

Riduzione consistente dei disagi dovuti a continui spostamenti della madre nel periodo finale della gravidanza e in gravidanze a rischio.

05

Riduzione di episodi negativi quali aborto spontaneo o natimortalità che possono creare situazioni difficili e di disagio nella gestante e nella sua famiglia.

COME FUNZIONA CICOGNA


1

Una fascia in materiale anallergico, con sensori incorporati, può essere facilmente indossata sotto l'abbigliamento quotidiano. La particolare conformazione della fascia rende difficile indossarla in posizione scorretta.



2

La fascia si indossa come una normale panciera. Se la fascia si arrotola o forma pieghe eccessive, o se viene indossata in maniera non corretta, l'app installata sullo smartphone invia un segnale d'allarme e fornisce istruzioni per correggere il suo posizionamento.

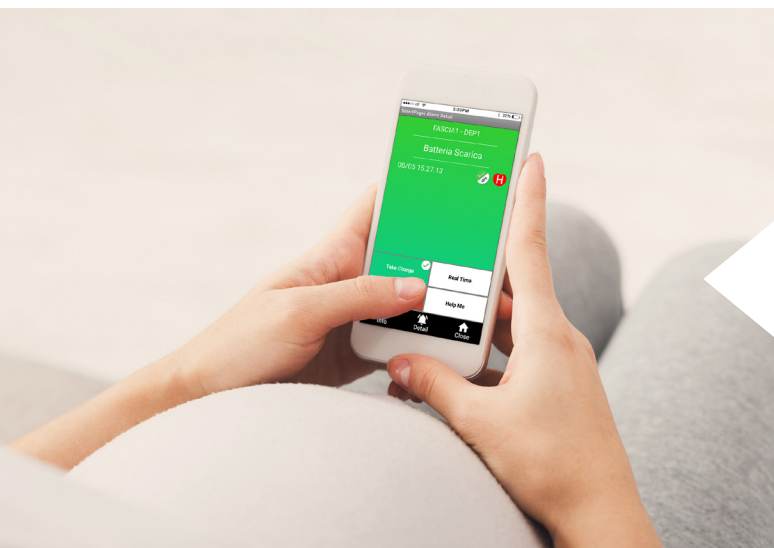


3

L'unità di trasmissione dei dati si applica facilmente sulla parte superiore della fascia, come illustrato nell'immagine.




FUNZIONALITÀ DI CICOGNA

Il controllo remoto è attivato con reciproco beneficio della madre, che riduce i propri spostamenti nel periodo finale della gravidanza, e della struttura sanitaria che può intervenire tempestivamente in caso di segnalazione di anomalie da parte di "Cicogna".

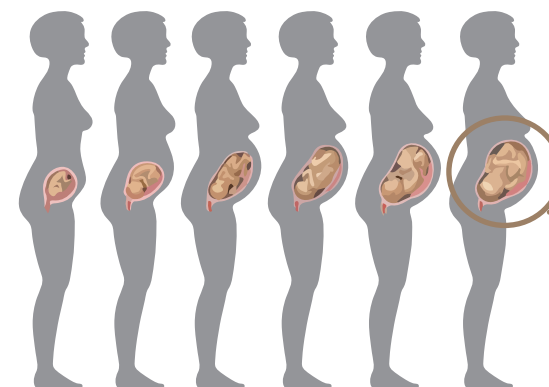

9 mesi

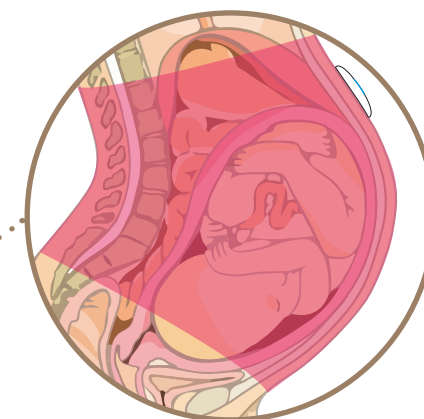

4 mesi >>> 9 mesi

Il posizionamento del dispositivo nella parte superiore della pancia consente di rendere applicabili e usufruibili tutte le sue funzioni.

